

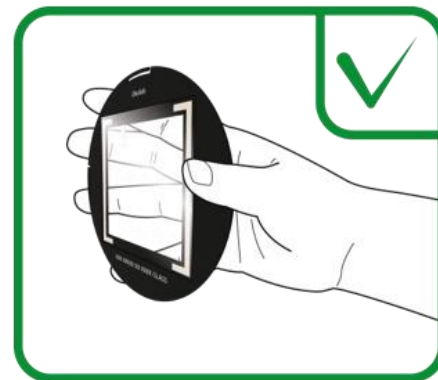
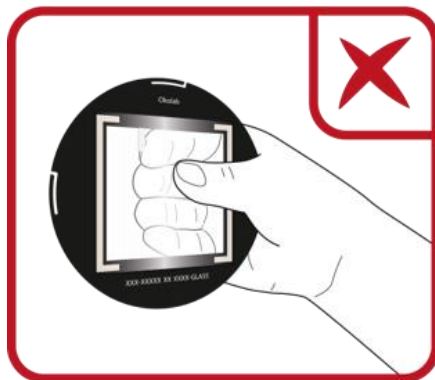


1. Pokyny k manipulaci (aby se zabránilo poškrábání a šmouhám na skle)



Vyhřívanou destičku vždy zvedejte tak, že zespodu bezpečně přidržíte její vnější okraje. Vyhněte se zvedání za vyhřívací drát, abyste předešli možnému poškození.

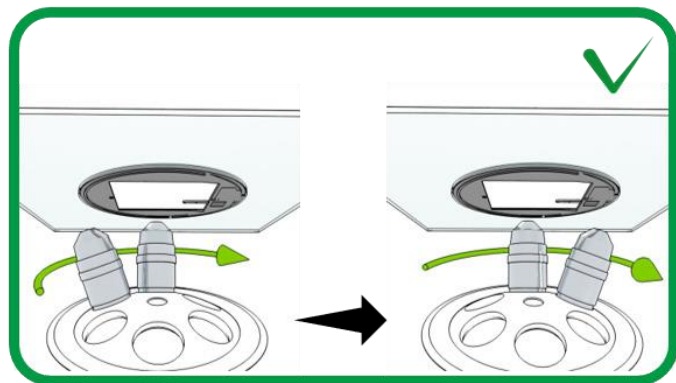

Při výměně čočky objektivu se prosím ujistěte, že jste snížili ohnisko aktuálního objektivu na dostatečnou vzdálenost, aby při otáčení objektivů nedošlo k přímému kontaktu mezi čočkou a skleněným povrchem destičky, což by mohlo způsobit její poškrábání.

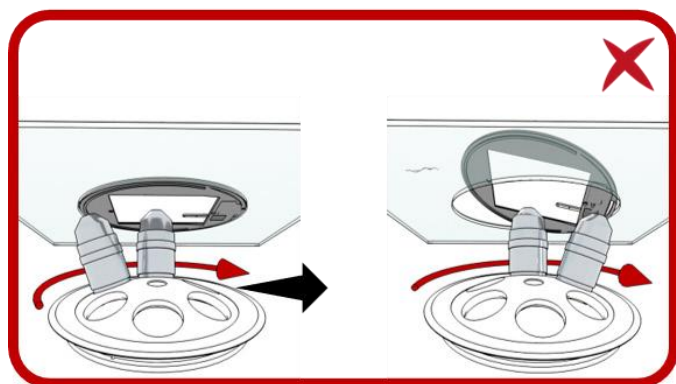


Nikdy nepokládejte demontovanou destičku lícem dolů na jakýkoliv povrch a věnujte maximální pozornost jejímu pečlivému uložení, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

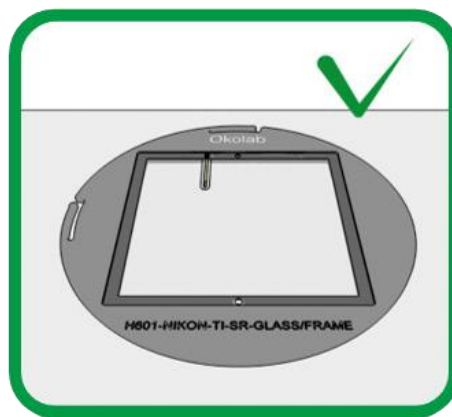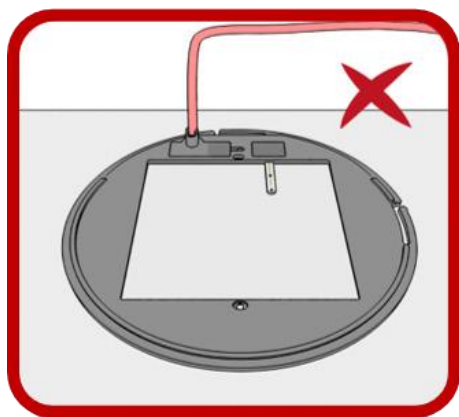

2. Pokyny pro čištění a údržbu

Začněte dezinfekcí nahřáté destičky pomocí **ultra jemného hadříku z mikrovlákna Okolab, který nepouští vlákna.** Navlhčete jej dezinfekčním roztokem schváleným pro IVF. OKOLAB navrhuje použití Oosafe

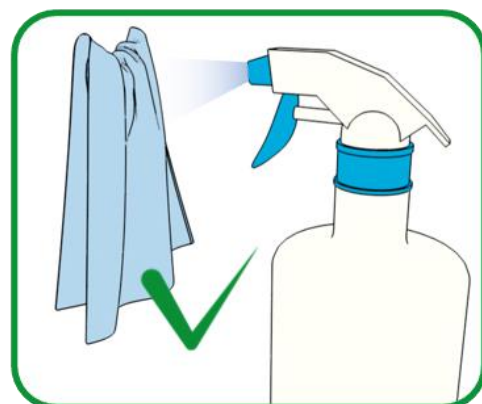

Skleněné a kovové části talíře ihned osušte opatrným přetřením denní části mikrovláknové utěrky na čišťené místo.

Po dezinfekci desky pokračujte v čištění vyhřívané desky pomocí **Ultrajemný čisticí hadřík z mikrovlákna, který nepouští vlákna** navlhčením čisticím roztokem schváleným pro IVF nebo 70% roztokem alkoholu.




Při dezinfekci a čištění nikdy nenanášejte kapalinu přímo na sklo, kovový rám nebo kabel. Namísto toho navlhčete hadřík z mikrovlákna čisticím roztokem a poté desku jemně očistěte.



Věnujte zvýšenou pozornost velmi jemnému otírání talíře hadříkem z mikrovlákna, protože hrubé otírání může způsobit škrábance.

Během čištění je důležité izolovat kabel, aby se zabránilo případným nehodám a poškození. Udržujte kabel mimo čisticí roztok a zaměřte se na účinné čištění povrchu destičky.

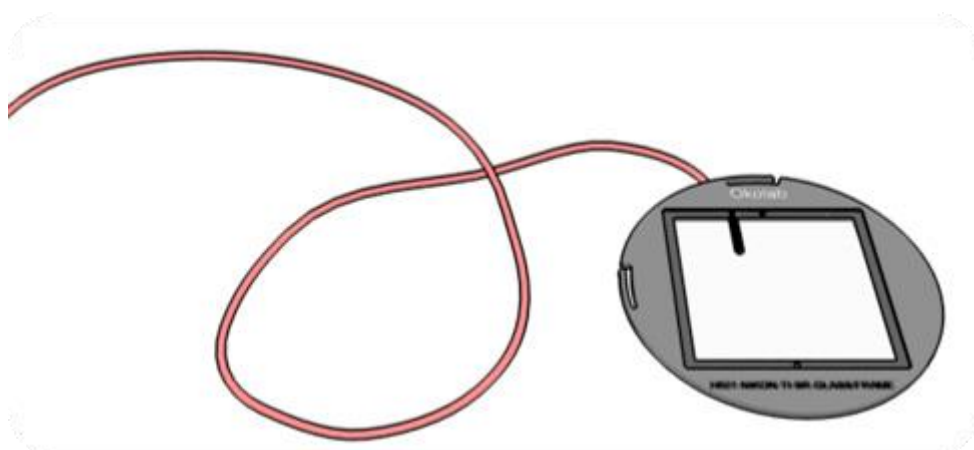

Pro další informace navštivte náš kanál YouTube **@OkolabTV**, kde najdete videa s návody na bezpečnou montáž a demontáž vyhřívaných destiček OKOLAB

